

Primu spray*

Désinfectant de surfaces. Prêt à l'emploi

*Premier spray

Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres... S'utilise en milieu hospitalier : tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen radiologique, salles de soin, chambres des malades... Permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables, jouets, équipements et accessoires sportifs... Agréablement parfumé à la menthe. Ne laisse aucune trace sur le support. Bactéricide. Levuricide. Virucide. (voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes).

Mode d'emploi

S'utilise pur.

Temps de contact : 30 secondes à 1 minute.
Le rinçage est inutile sauf dans le cas de surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires et les objets pouvant être portés à la bouche.

En milieu hospitalier : pulvériser sur la surface à désinfecter, puis laisser sécher.

Pour le mobilier : pulvériser la surface et essuyer si nécessaire.

Conditionnements

- Emballage : carton de 12 flacons de 750ml.

Données techniques

- Aspect : liquide limpide
- pH : 7,7 - 8,7
- Densité : 0,95 - 0,97

Précautions

Usage professionnel uniquement.

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Ne pas mélanger avec d'autres produits antiseptiques.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Stockage

Conditions inhérentes aux produits inflammables.

Sécurité selon FDS

Liquide inflammable, Catégorie 3.

Irritation oculaire, Catégorie 2.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

29-03-2024 Ind. 4 ■



Propriétés microbiologiques Primu spray*

*Premier spray

en conditions de propreté

NORME EN 1276

en conditions de propreté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 13697

en conditions de propreté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 13727

en conditions de propreté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli K12
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 16615

en conditions de propreté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli K12
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 1650

en conditions de propreté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 13697

en conditions de propreté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 13624

en conditions de propreté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 16615

en conditions de propreté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 14476

en conditions de propreté
Virucide
spectre limité

SOUCHES

Adenovirus Type 5
Norovirus Murin
Coronavirus Humain
HCoV-229E
autres souches couverte par la
norme voir liste ci-dessous

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 14476

en conditions de propreté
Virucide

SOUCHES

H1N1

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

DILUTION s'utilise pur

NORME EN 16777

en conditions de propreté
Virucide
spectre limité

SOUCHES

Adenovirus Type 5
Norovirus Murin
autres souches couverte par la
norme voir liste ci-dessous

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

Propriétés microbiologiques

Primu spray*

*Premier spray

en conditions de saleté

NORME

EN 1276

en conditions de saleté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

NORME

EN 13697

en conditions de saleté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

NORME

EN 1650

en conditions de saleté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

NORME

EN 13697

en conditions de saleté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION s'utilise pur

SPECTRE LIMITÉ

Coronavirus
Adénovirus type 5
Norovirus murin
Rotavirus
Virus de la Vaccine
Filoviridae
Flavivirus
Herpesviridae
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'Hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Paramyxoviridae
Virus de la rubéole
Virus de la rougeole
Virus de la rage
Poxviridae